

チェアサイド用 デンチャー研磨スペシャルセットⅡ

アクリックレジンの手軽な再光沢研磨法!!

美しく光沢研磨されたアクリックレジン床も、調整の段階で光沢が失われてしまいます。元の光沢に戻すには、なかなか手間のかかる作業です。これがチェアサイドで、手軽におこなっていただけます。各種研磨剤を含浸していますので、何もつけずに使用できます。

商品名：デンチャー研磨スペシャルセットⅡ
定 価：5,000円(税別)

内容：ソフトボル(ハード/ソフト) ×各3枚
カラーホイール(ブラウン/ピンク) ×各3枚
ソフトボル・ビッグマン(ラージヘッドマンドレル) ×4本
ソフトボル・ポイント(軸付) ×1本



一般医療機器：歯科技工用研削・研磨器材キット 28B3X00040000009

作業例 《作業手順》

最高使用回転数6,000rpm

0 カーバイトバー、スタンプバー等で削合調整を行う。

1 ソフトボル(ハード)



ソフトボル(ハード)で軽く深い傷を取ります。

2 ①ソフトボル(ソフト)
②ソフトボル・ポイント



①ソフトボル(ソフト)でソフトボル(ハード)の傷を取ります。②ソフトボル・ポイントも同様に傷取りに使用します。傷が浅い場合はここからでも良い。

3 カラーホイール(ブラウン)



カラーホイール(ブラウン)でソフトボル(ソフト)の傷を取ります。やや光沢が得られます。

4 カラーホイール(ピンク)



カラーホイール(ピンク)で光沢研磨を行います。美しい光沢が得られます。



研磨作業のエンジンの回転速度は中低速です(6,000rpm位)。ソフトボル、カラーホイール共に何もつけずに研磨できます。研磨材が不足の場合は、各種用途に合った研磨材を併用してください。



製造販売元

デンタルエイド株式会社

〒662-0005 兵庫県西宮市湯元町2-1

TEL : 0798-70-5883 FAX : 0798-70-5884

http://www.dentalaid.co.jp